

Przycisk przewidziany jest do współpracy z urządzeniami produkcji GORKE Electronic należącymi do serii SA.



PARAMETRY TECHNICZNE	częstotliwość	433,92 MHz
	kodowanie	kod zmienny
	ilość klawiszy	1 + wejście EXT
	moc nadawcza	≤ 10 dBm
	zasilanie	9 - 28V DC
	pobór prądu - (min)	8 mA
	pobór prądu - w trakcie nadawania (max)	35 mA
	sygnalizacja akustyczna w trakcie nadawania	wbudowany buzzer
	kolor podświetlenia	zielony
	temperatura pracy	-10 ÷ +55 °C
	wilgotność (max)	93 ± 3 %
	wymiar (z ramką) - montaż PT	84×84×16 mm
	wymiar (z ramką i puszką NT) -montaż NT	84×84×50 mm
	kolor obudowy	biały (fabrycznie) lub kolor (opcja)
	współpraca	odbiorniki serii SA
	zasięg	200 lub 400m odpowiednio z H1 lub H2
	masa NT/PT	135g / 180 g
	montaż PT	puszka końcowa Ø60mm / łapki i wkręty



Cechy

- ciągłe podświetlenie (o obniżonej jasności)
- sygnalizacja zadziałania - akustyczna i optyczna (o zwiększonej jasności)
- pojedyncze naciśnięcie klawisza powoduje wydłużoną transmisję niezależną od czasu działania przełącznika
- wyraźne znakowanie, odporne na mycie detergentami i środkami dezynfekującymi oraz na ścieranie
- montaż podtynkowy w puszkach końcowych Ø60mm - montaż na łapki i wkręty
- jako opcja dostępna jest dedykowana puszka do montażu natynkowego
- dodatkowe zaciski pozwalają na podłączenie zewnętrznego przycisku zwrotnego
- urządzenie oparte jest na elementach osprzętu elektroinstalacyjnego serii AS produkcji firmy OSPEL SA® co pozwala zachować zgodność wzorniczą z pozostałymi jej elementami

Zastosowanie:

W systemach przywoławczych, przycisk pełni rolę przycisku wezwania pomocy.

Zazwyczaj montowany jest na sali chorych, przy łóżku pacjenta lub innym wybranym (wygodnym do użycia) miejscu. Użycie przycisku (naciśnięcie klapki) powoduje wystąpienie sygnału, który jest interpretowany w systemie jako wezwanie pomocy oraz w przypadku stosowania sygnalizatora, spowoduje jego załączenie.

W standardzie przewidziany jest do montażu podtynkowego, a jako opcja dostępny jest w wersji natynkowej z dedykowaną puszką natynkową.

Przycisk alarmowy serii ramkowej dostępny jest w wersji bateryjnej (należy pamiętać, że w tej opcji nie jest dostępne stałe podświetlenie nadajnika).

Opis działania

W stanie czuwania włączone jest podświetlenie w kolorze zielonym o obniżonym poziomie jasności. Po naciśnięciu klawisza następuje wyzwolenie transmisji radiowej co jest sygnalizowane pulsowaniem podświetlenia o zwiększonej jasności oraz przez pulsujący dźwięk buzzera. Czas trwania transmisji oraz jej sygnalizacji wynosi ok. 2s i jest niezależny od szybkości i czasu naciskania klawisza. Pozwala to na wysłanie wielokrotnych sygnałów zwiększających niezawodność transmisji oraz zabezpiecza przed wywołaniem ciągłej transmisji w przypadku trzymania ciągłego naciskania klawisza.

W medycznych Systemach Przywołania stosowany jest w połączeniu z sygnalizatorami np. BSO-300/BSO-400 i odbiornikami identyfikacyjnymi np. IDO-1000. Warianty kolorystyczne ramek: biały (standard), zielony, turkus, fiolet, burgund.